


Liberación del respaldo para RCP



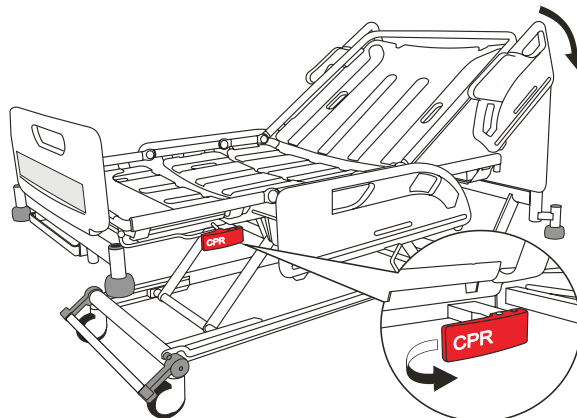


Tire de la palanca de RCP roja situada a ambos lados de la cama para bajar rápidamente el respaldo.


Barandillas laterales: subida



No deje las barandillas laterales en la posición levantada si el perno de bloqueo es visible por detrás del tirador azul.

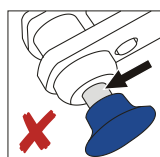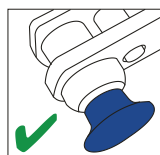
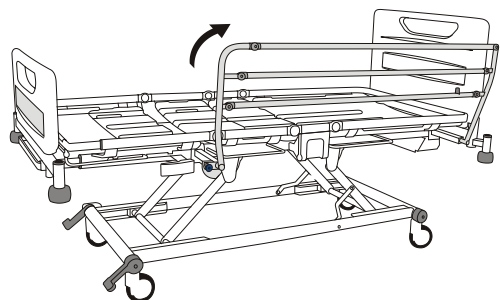


Asegúrese de que la barandilla lateral está bien bloqueada cuando esté en posición elevada.

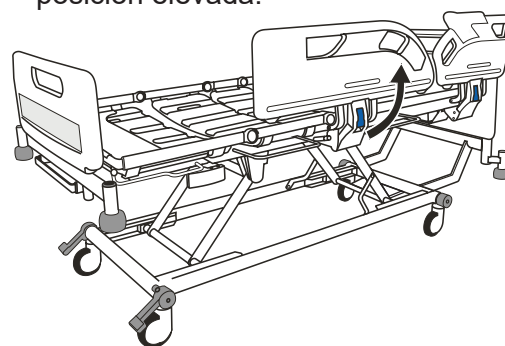


Sujete la barandilla lateral. Tire de la barandilla lateral hasta bloquearla en la posición levantada.

Barandillas laterales: bajada

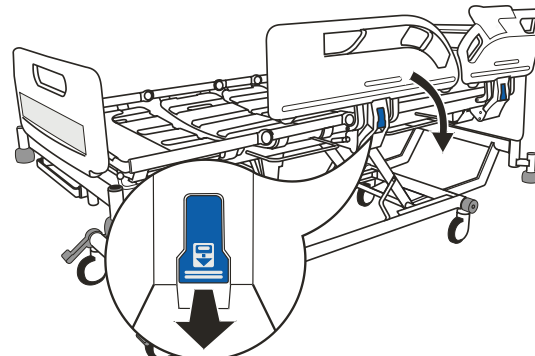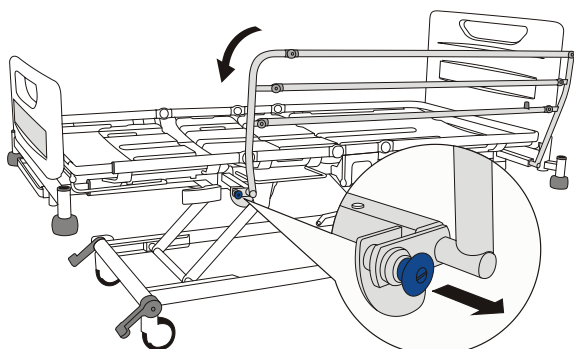



Sujete la barandilla lateral. Tire del tirador azul o de la palanca de desbloqueo azul y baje la barandilla lateral.

Frenos y dirección

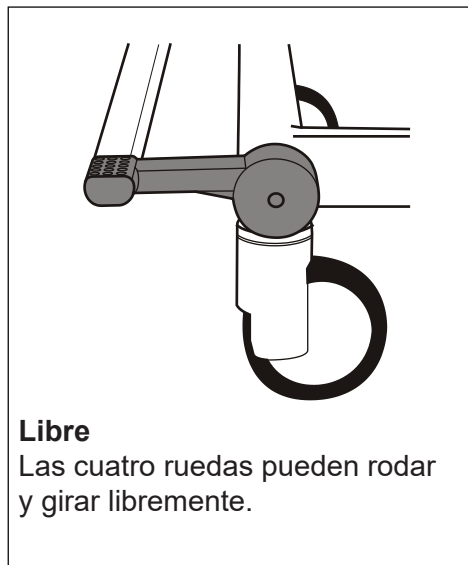

Los frenos deben activarse siempre cuando la cama esté parada.

Ajuste de la longitud de la cama (tres posiciones)

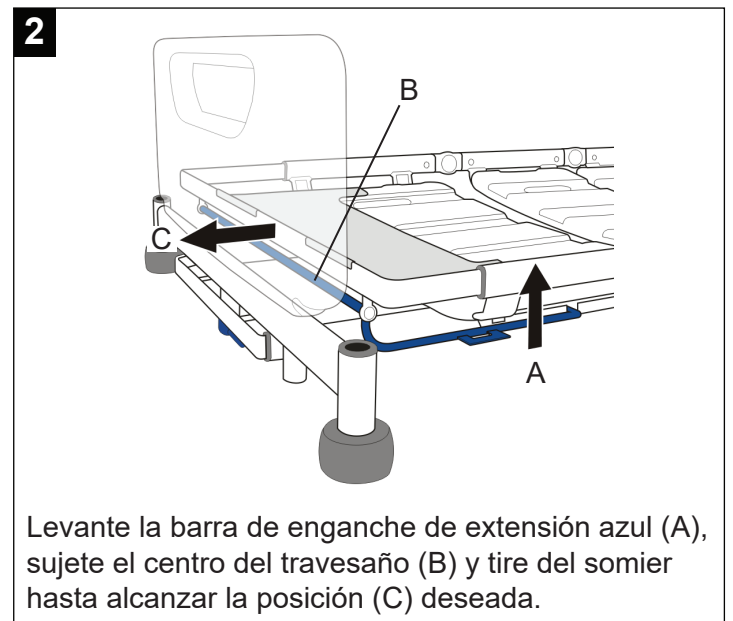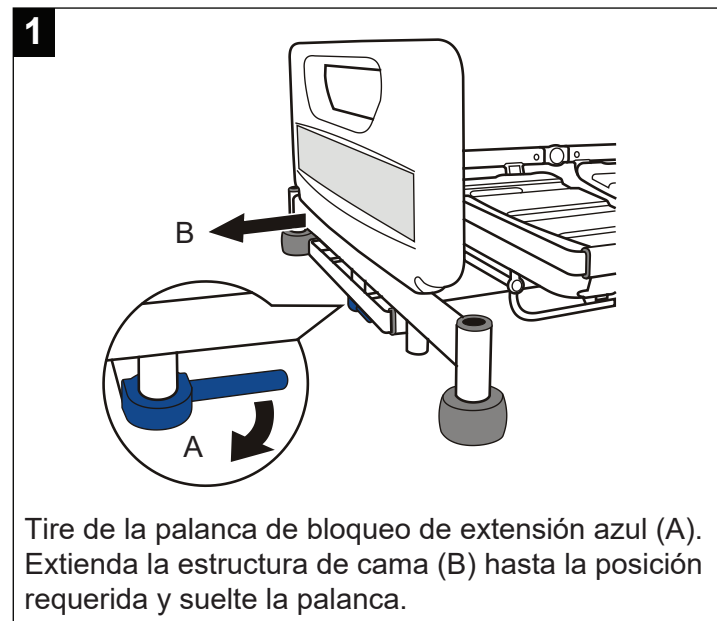

Ajuste de la sección de las pantorrillas

